

NEU

EasyStop – Einfach genial!

Dental-Steril-Container-System mit Sicherheits-Filter

Mit dem neuartigen EasyStop-System antwortet USTOMED auf gewachsene Anforderungen an Sterilität, Umweltschutz und Handlingkomfort. Das filterlose System stoppt Mikroorganismen noch wirksamer als herkömmliche Filter und lässt sich **beliebig oft resterilisieren**. Dabei bedarf es keinem Verbrauchsmaterial. Zum Öffnen bzw. Schließen genügt **ein Griff**: Filterabdeckung eindrücken, drehen - fertig.



Die zentral eingelassene, gefederte Glaskugel bildet die Sperre der **Push&Turn-Verriegelung**.

Diese Vorteile sprechen dafür:

- Der einzigartige Deckel ist **nahezu unverwüsthlich**: Er wird aus einem massiven Aluminiumblock präzisionsgefräst. So bleibt er immer in Form und ist wie geschaffen für den harten Alltag.
 - **schmutz- und keimabweisend**
 - schnelle, rückstandsfreie **Trocknung** bei Dampfsterilisation
 - **hochwertiges Material für dreifache Sicherheit**: adhäsionsfrei, porenfrei und korrosionsfrei
- ▶ alle Containergrößen siehe Seite 4b



Prinzip der Pasteurschen Schleifen

Als Keimbarriere dient der zweiteilige Aluminium-Einsatz im Deckel des Sterilcontainers. Er bildet ein Labyrinth aus Ringrippen, das Mikroben, Keime und Partikel zuverlässig abscheidet. Der mäandrierende Strömungspfad erzielt dabei einen Abschneidgrad von 99,997 %.



Das Ringrippen-Labyrinth stoppt die Mikroben, Keime und Partikel im Belüftungsstrom. Somit bleibt das Sterilgut im Container dauerhaft geschützt.